




neodisher endo[®] CLEAN

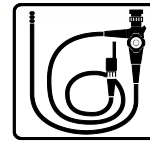

**Απορρυπαντικό για την
αυτόματη και χειρωνακτική
επανεπεξεργασία εύκαμπτων ενδοσκοπίων**

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Καθαρισμός των εύκαμπτων ενδοσκοπίων και των ενδοσκοπικών εξαρτημάτων σε πλυντήριο-απολυμαντές για ενδοσκόπια ό
- Χειρωνακτικός καθαρισμός των εύκαμπτων ενδοσκοπίων και των ενδοσκοπικών εξαρτημάτων σε λουτρό βυθισμού ή σε πλυντήριο υπερήχων.

Φάσμα Δράσης:

- Το neodisher endo CLEAN διαλύει αποτελεσματικά οργανικά υπολείμματα και εμποδίζει την εναπόθεσή τους
- Αφαιρεί αξιόπιστα υπολείμματα αποξηραμένου και μετουσιωμένου αίματος
- Βοηθά στην απομάκρυνση των βιοφιλμ
- Πληροί τις τρέχουσες συστάσεις του Ινστιτούτου Robert-Koch (RKI) για την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της νέας μεταλλαγμένης νόσου Creutzfeldt-Jakob (vCJD)
- Το ανοδιωμένο αλουμίνιο πρέπει να ελέγχεται για συμβατότητα πριν από τη χρήση.

Ειδικές ιδιότητες:

- Εξαιρετική καθαριστική δράση η οποία οφείλεται σε μία μοναδική σύνθεση με βάση τα αλκάλια, τα ένζυμα και τα τασιενεργά
- Αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού, ως εκ τούτου η καθαριστική δράση δεν αναστέλλεται από την ανάπτυξη αφρού
- Εξαιρετική συμβατότητα με τα υλικά, κατάλληλο για ενδοσκόπια όλων των κορυφαίων κατασκευαστών
- Όταν χρησιμοποιείται για χειρωνακτική πρόπλυση, το καθαριστικό διάλυμα δεν χρειάζεται να ξεβγαλθεί πριν το στάδιο αυτόματης επανεπεξεργασίας με neodisher endo CLEAN

Εφαρμογή και δοσολογία:

- Για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση καθαρισμού οι ακόλουθες παράμετροι πρέπει να τηρούνται:

| | |
|---|---|
| Αυτόματος καθαρισμός εύκαμπτων ενδοσκοπίων | 5 ml/l (0.5%), 35 - 55 °C, 3 - 10 λεπτά* |
| Αυτόματος καθαρισμός θερμοανθεκτικών εξαρτημάτων ενδοσκοπίων | 2 - 10 ml/l (0.2 - 1 %), 40 - 60 °C, 10 λεπτά |
| Χειρωνακτικός καθαρισμός | 5 - 10 ml/l (0.5 - 1 %), max. 40 °C, 5 - 10 λεπτά |

Η απόδοση καθαρισμού πρέπει να επαληθεύεται με μια επιτόπια επικύρωση

- Στην περίπτωση χειρωνακτικού ή αυτόματου καθαρισμού θερμοανθεκτικών εξαρτημάτων, η δοσολογία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το βαθμό του ρύπου.
- Προκειμένου να αποφευχθούν στίγματα νερού συνιστάται η χρήση αποιονισμένου νερού στο τελικό ξέβγαλμα
- Το διάλυμα για τον χειρωνακτικό καθαρισμό πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον μία φορά καθημερινά ή οποτεδήποτε είναι εμφανές βρώμικο.
- Τα προϊόντα neodisher endo CLEAN και neodisher endo SEPT GA ή neodisher endo SEPT PAC είναι απόλυτα συμβατά. Πιθανή μεταφορά του διαλύματος neodisher endo CLEAN στη φάση της απολύμανσης δεν έχει καμία επίδραση στην απολυμαντική απόδοση του neodisher endo SEPT GA ή αντίστοιχα του neodisher endo SEPT PAC.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατάλληλο δοσομετρικό εξοπλισμό / δοσομετρικά παρελκόμενα.



neodisher endo[®] CLEAN

Σημειώσεις εφαρμογής:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Το διάλυμα neodisher endo CLEAN πρέπει να ξεβγαθεί εντελώς με νερό (κατά προτίμηση απιονισμένο νερό).
- Ξεβγάλετε το σύστημα δοσομέτρησης συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα αναρρόφησης με νερό πριν αλλάξετε προϊόν.
- Η επανεπεξεργασία θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα διατάγματα σύμφωνα με την Οδηγία Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλα επικυρωμένες διαδικασίες.
- Παρακαλούμε, τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού για επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας DIN EN ISO 17664.
- Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του πλυντηρίου απολυμαντή.
- Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

| | |
|--------------------------|--|
| Έυρος pH | 10.8 -11.2 (2 -10 ml/λίτρο, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20°C) Η τιμή του pH μπορεί να παρεκκλίνει στο νερό βρύσης ή στο μαλακό νερό ή λόγω π.χ. μεταφοράς νερού από την πρόπλυση. |
| Ιξώδες | < 10 mPa s (συμπυκνωμένο, 20°C) |
| Πυκνότητα | περ. 1.1 g/cm ³ (20°C) |
| Συντελεστής τιτροδότησης | 0.76 (σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες τιτροδότησης του neodisher endo CLEAN) |

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά:
< 5% μη ιονικά τασιενεργά
επίσης: ένζυμα


Σήμανση CE:

Το neodisher endo CLEAN συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Αποθηκεύετε σε δροσερό αλλά όχι παγωμένο μέρος. Μακριά από το ηλιακό φως. Πάντοτε αποθηκεύετε σε χώρο με θερμοκρασία μεταξύ 0 και 25 °C.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Για την ημερομηνία λήξης δείτε τη σήμανση στην ετικέτα του δοχείου, δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας .

Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές στο χρώμα του προϊόντος κατά την αποθήκευση σε εργοστασιακά σφραγισμένες εμπορικές μονάδες. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στις ιδιότητες του προϊόντος που σχετίζονται με την εφαρμογή.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Το neodisher endo CLEAN δεν είναι επικίνδυνο προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (EC) 1272/2008.

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για τη διάθεση των υπολειμμάτων του προϊόντος, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweiger.com στην κατηγορία «Service/Downloads».

MB 4074/3-7 07/2022



Αναλώσιμα ιατρικά είδη - Ορθοπεδικά βοηθήματα

Διεύθυνση: Κορίνθου 330
Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 341207

email: info@e-pharmamed.gr
FB: PHARMAMED ΙΑΤΡΙΚΑ
website: www.e-pharmamed.gr

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν εμπεριέχουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.