




# neodisher endo<sup>®</sup> SEPT GA

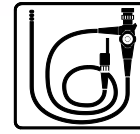

## Απολυμαντικό υψηλού βαθμού για την αυτόματη επεξεργασία εύκαμπτων ενδοσκοπίων

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Υψηλού βαθμού απολύμανση εύκαμπτων ενδοσκοπίων σε πλυντήρια ενδοσκοπίων για εύκαμπτα ενδοσκόπια

Φάσμα δράσης:

- Δραστικό έναντι βακτηρίων (συμπ. MRSA, βακτηρίων που προκαλούν φυματίωση και του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού), μυκήτων και ιών (συμπ. ηπατίτιδας A, B και C, HIV, rotaviruses, noroviruses)
- Η απολυμαντική δράση έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14885.
- Το neodisher endo<sup>®</sup> SEPT GA εναρμονίζεται στις απαιτήσεις των απολυμαντικών για απολύμανση εύκαμπτων ενδοσκοπίων σύμφωνα με την Οδηγία DIN ISO 15883-4.
- Η αυτόματη διαδικασία επεξεργασίας με neodisher endo CLEAN και neodisher endo SEPT GA πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας DIN EN ISO 15883-4 όσον αφορά τη μείωση μικροβίων άνω του  $> 9\log_{10}$  στη συνολική διαδικασία. Επιπροσθέτως, είναι δραστικό έναντι των σπόρων Clostridium difficile.
- Περιλαμβάνεται στη λίστα απολυμαντικών του IHO<sup>1</sup>.

Ειδικές ιδιότητες:

- Ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη λόγω της ήπιας οσμής του.
- Υψηλή συμβατότητα υλικών, κατάλληλο για ενδοσκόπια όλων των κορυφαίων κατασκευαστών.
- Χωρίς φορμαλδεΐδη και τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου (QAC).

Εφαρμογή και δοσολογία:

- Το neodisher endo SEPT GA χρησιμοποιείται σε πλυντήρια εύκαμπτων ενδοσκοπίων. Η δοσολογία του neodisher endo SEPT GA γίνεται μέσω της δοσομετρικής αντλίας του πλυντηρίου στην αρχή της φάσης απολύμανσης. Οι ακόλουθες παράμετροι πρέπει να τηρούνται για την επίτευξη του φάσματος δράσης που αναφέρεται παρακάτω:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Βακτηριοκτόνος, μυκητοκτόνος, μυκοβακτηριοκτόνος και ιοκτόνος δράση | 10 ml/l (1,0%),<br>55 °C, 5 λεπτά |
|---|-----------------------------------|

- Για την αποφυγή στιγμάτων νερού, συνιστάται η χρήση αποιονισμένου νερού στο τελικό ξέβγαλμα.
- Για το στάδιο του καθαρισμού προτείνουμε το αλκαλικό-ενζυματικό απορρυπαντικό neodisher endo CLEAN.
- Τα προϊόντα neodisher endo CLEAN και neodisher endo SEPT GA είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους. Μία πιθανή μεταφορά του neodisher endo CLEAN στη φάση της απολύμανσης δεν έχει καμία επίδραση στην απολυμαντική απόδοση του neodisher endo SEPT GA.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Το διάλυμα neodisher endo SEPT GA πρέπει να ξεβγαλθεί πλήρως με νερό (κατά προτίμηση αποιονισμένο νερό).
- Ξεβγάλετε το σύστημα δοσομέτρησης συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα αναρρόφησης με νερό πριν αλλάξετε σε άλλο προϊόν.
- Η επανεπεξεργασία θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις σύμφωνα με την Οδηγία περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και πρέπει να γίνεται με τις κατάλληλα τεκμηριωμένες διαδικασίες.
- Παρακαλούμε, τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 17664.
- Να τηρείτε τις οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου ενδοσκοπίων.
- Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα.



# neodisher endo<sup>®</sup> SEPT GA

## Μελέτες εμπειρογνομόνων:

Η απολυμαντική δράση έχει επιβεβαιωθεί με πιστοποιήσεις. Αντίγραφα των μελετών είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

|           |  |
|-----------|--|
| Τιμή pH   | Περίπου 4.3 (1.0%, σε απιονισμένο νερό, 20 °C) |
| Ιξώδες    | < 10 mPa s (συμπυκνωμένο, 20 °C)               |
| Πυκνότητα | περ. 1.0 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)             |


## Συστατικά:

Απολυμαντικοί παράγοντες στα 100 g:  
10,5 g γλουταραλδεΰδη

Σήμανση CE: 

Το neodisher endo SEPT GA συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.

## Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντοτε αποθηκεύετε σε χώρο με θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 30 °C. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Για την ημερομηνία λήξης δείτε τη σήμανση στην ετικέτα του δοχείου, δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας. 

## Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφάλειας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com) στην κατηγορία «Service/Downloads».

Απρρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για τη διάθεση των υπολειμμάτων του προϊόντος, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

MB 4071 / 3-3  
07/2020

Ίβιομηχανική Ένωση Προστασίας Επιφανειών και Υγιεινής,  
Γερμανία



**Pharmamed**  
Αναλώσιμα ιατρικά είδη - Ορθοπεδικά βοηθήματα

Διεύθυνση: Κορίνθου 330  
Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 341207

email: [info@e-pharmamed.gr](mailto:info@e-pharmamed.gr)

FB: PHARMAMED IATRIKA

website: [www.e-pharmamed.gr](http://www.e-pharmamed.gr)

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν περιλαμβάνουν περιγραφή ποιότητας ή υπόσχεση συγκεκριμένων ιδιοτήτων.